


思傑夢想有限公司 AED電擊貼片更換注意事項

Step 1.
請確認新收到之電擊貼片效期是否與銷貨單內容一樣。

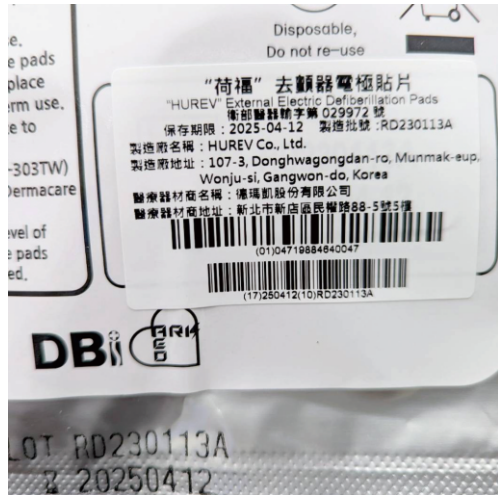

Step 2.
請確認耗材效期靜電貼紙上之效期是否與耗材現況效期吻合。



Step 3.
打開玻璃門時警報器會響，取出AED後關門即會停止聲響。



Step 4.
打開AED背包，自網袋內取出欲更換之電擊貼片，再放入新效期電擊貼片。



Step 5.
請將保養紀錄紅卡修改為最新電擊貼片效期，及填寫背面保養紀錄。



Step 6.
AED歸位後，擇一玻璃平面位置擦淨，將耗材效期靜電貼貼上。



◆注意事項：

- (1)請保持電擊貼片外包裝密封完整狀態。
若拆封會使電擊貼片變乾、氧化，黏性與導電性將會變差。
 - (2)為衛生與導電性考量，電擊貼片為一次性使用，若使用後需更換，請勿重複使用。
 - (3)舊貼片可標註後用於教育訓練使用。
(請勿與新貼片置於同一處存放，避免混淆)
 - (4)若不留存舊貼片，可以電子回收類回收。
- ★詳細內容請參考AED說明書。