

# 思傑夢想有限公司 AED電池更換注意事項

Step 1.  
請確認銷貨單上之電池效期是否為收到之電池上的安裝日期往後推4年。



Step 2.  
請確認耗材效期靜電貼紙上之效期是否與耗材現效期吻合。



Step 3.  
打開玻璃門時警報器會響，取出AED後關門即會停止聲響。



Step 4.  
打開AED背包，將AED主機翻至背面。



Step 5.  
請將卡榫向右按壓，再向上扳起，取出舊電池。



Step 6.  
請將新電池先以此傾斜方式置入。



Step 7.  
請確認電池金屬感應接點有對應至同一方向。



Step 8.  
再往下放平後按壓，聽到"喀"一聲即安裝完成。



# 思傑夢想有限公司 AED電池更換注意事項

Step 9.  
請將保養紀錄紅卡正面更改電池安裝日期(與電池上貼紙相符)，並填寫背面保養紀錄



Step 10.  
AED歸位後，擇一玻璃平面位置擦淨，將耗材效期靜電貼貼上。



## ◆注意事項：

- (1)請務必依照步驟安裝電池。
- (2)自安裝日起，AED待機下，電池壽命為四年。
- (3)安裝後，請確認AED主機燈號是否為平均20-30秒閃一次的藍燈。  
若遇燈號為紅燈，請開機確認AED語音提示後，盡速與我司聯絡(03-455-5988)。
- (4)因寄送運程關係，預設電池安裝日期為寄出後次日。
- (5)舊電池可依廢電池分類回收。
- (6)其它商品細項說明，請參見ARK-501使用說明書。